

SKIN TEARS CLASSIFICATIE



CATEGORIE 1: GEEN HUIDVERLIES

A: Lineaire scheur: epidermis en dermis zijn uit elkaar getrokken, waardoor omliggend weefsel wordt blootgesteld.

B: Flap scheur: epidermitale huidflap die volledig kan worden gesloten. Hierbij is maximaal 1 mm van de epidermis zichtbaar.



CATEGORIE 2: GEDEELTELIJK HUIDVERLIES

A: Gering huidverlies: maximaal 25% v.d. epidermische flap is verloren gegaan.

B: Redelijk/veel huidverlies: meer dan 25% v.d. epidermische flap is verloren gegaan en meer dan 25% v.d. dermis is blootgesteld.



CATEGORIE 3: VOLLEDIG HUIDVERLIES

Huidscheur waarvan de epidermische flap volledig is verwijderd.

WOND
VOCHT

NIET
GEÏNFECTEERD

GEÏNFECTEERD



DROGE WOND

UrgoTul

UrgoTul sso



LICHT TOT MATIG
EXSUDERENDE
WOND

UrgoTul

*

UrgoTul sso

**



MATIG TOT STERK
EXSUDERENDE
WOND

UrgoTul Foam

*

UrgoClean Ag

**



MET DEBRIS

UrgoClean

**

UrgoClean Ag

**

| | Afmeting | Stuks | Z-index Code | Artikel-nummer |
|---------------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| UrgoTul sso | 10x12 cm | 10 | 14904586 | 507696 |
| | 15x20 cm | 10 | 14904594 | 507697 |
| UrgoClean Ag | 6x6 cm | 5 | 16078020 | 552161 |
| | 10x12 cm | 5 | 16078039 | 551402 |
| | 15x20 cm | 5 | 16078047 | 551403 |
| UrgoTul | 5x5 cm | 10 | 14904535 | 505008 |
| | 10x10 cm | 10 | 14904543 | 505009 |
| | 10x40 cm | 10 | 14904578 | 505010 |
| | 15x20 cm | 10 | 14904551 | 505011 |
| UrgoTul Foam | 6x6 cm | 10 | 15999750 | 551223 |
| | 10x12 cm | 10 | 15999777 | 551224 |
| | 15x20 cm | 10 | 15999785 | 551225 |
| | Hiel 12x19 cm | 5 | 15999769 | 551226 |
| UrgoClean | 6x6 cm | 10 | 15757919 | 550108 |
| | 10x12 cm | 10 | 15757927 | 550109 |
| | 15x20 cm | 10 | 15757935 | 550110 |

Definitie skintears

Bij het klimmen van de jaren vinden er structurele veranderingen plaats in het lichaam. Een van die veranderingen is het kwetsbaarder worden van de huid. Een huid die verouderd loopt het risico te scheuren door schuifkracht en/of frictie. De wond die zo ontstaat is pijnlijk en veroorzaakt veel ongemak. Het is bovendien een wond die moeilijk geneest en daarmee een zware belasting is voor de patiënt. De juiste behandeling kan veel leed voorkomen en bovendien kosten besparen en deze twee argumenten gaan steeds meer hand in hand.

* = Extra fixatie noodzakelijk

Extra fixatie: secundair vastzetten van het verband.

** = In combinatie met een secundair verband en extra fixatie

Secundair verband: extra verband om wondvocht op te nemen.

*** = In combinatie met een secundair verband en extra fixatie. Eventueel

behandelen met een hydrogel

Hydrogel: gel voor het creëren van een vochtig wondmilieu en het oplossen van droge debrisis.

Vorbereiding van de wond

1. Reinig de wond met een fysiologische zoutoplossing.
2. Dep de wond voorzichtig en zorgvuldig droog.
3. Met behulp van een pincet kan het omgekrulde huidflapje glad worden gestreken en (volledig) over de wond worden gespreid.
4. Breng het verband aan.
5. Fixeer het verband met een windsel.

Tips om skintears te helpen voorkomen

Bescherming van de huid:

- Kleding met lange mouwen
 - Beenbeschermers
 - Buisverband of zwachtel
 - Huid droog deppen, niet wrijven
 - Huid beschermen en hydrateren
- Hanteer de juiste lift, positioneer en draaitechnieken.

Urgo Nederland B.V.

Nieuwezijds Voorburgwal 104 - 108

1012 SG Amsterdam

Tel.: +31 (0) 20 8546 415

www.UrgoMedical.nl

URGO
MEDICAL
Healing people®